

MEY-KO

CATÁLOGO CUIDADO DE HERIDAS



APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO



Alginato de calcio más sodio, entra en contacto con el lecho de la herida exudada, liberando calcio para la alta absorción del peso de fuga y proporcionando un ambiente húmedo para su cicatrización.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Alginato de calcio: 100%
- Alginato de sodio: 20%

INDICACIONES:

- Para heridas exudativas cavitadas o superficiales.
- Gangrenas de Fournier.
- Abscesos perianales.
- Dehiscencia de heridas.
- Úlceras neuropáticas.
- Úlceras vasculares.
- Exceso de hipergranulación.

MODO DE USO:

Realizar la asepsia de la herida estéril, secar el lecho de la herida y colocar apósito de alginato de calcio, realizar cambios cada 24hrs máximo 48hrs, y cubrir con apósito secundario.

PRECAUCIONES:

- No utilizar si hay tendón expuesto.
- No utilizar con soluciones yodadas.

TAMAÑO: 10x10cm - 15x20cm.

Contaminated Decubitus Ulcer | San Pedro Sula



Day #1 | [February 28]

Calcium alginate dressing with silver.

*Daily change for three (3) days.



Day #4 | [March 04]



Day #7 | [March 06]



Day #11 | [Marzo 10]



Day #14 | [March 13]

Hydrogel with hydrocolloid dressings.

*Daily change for seven (7) days.

Diabetic Px ready for amputation | La Ceiba

Px: 56 years
Healing time: 21 days
Body part: Right inner thigh.



Day #1 | [January 31]

Calcium alginate dressing with silver.



Day #1 | [January 31]



Day #21 | [February 20]

Hydrogel dressing.



Day #21 | [February 20]

Hydrogel dressing.

APÓSITO DE HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO



Apósito de hidrocoloide estéril, compuesto de adhesivo termofusible médico más carboximetilcelulosa de sodio (CMC), apto para proporcionar ambiente húmedo ideal para la cicatrización y protección en el lecho de la herida.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Carboximetilcelulosa sódica: 35%
- Adhesivo termofusible médico: 60%

INDICACIONES:

- Úlceras neuropáticas.
- Úlceras vasculares.
- Abrasiones.
- Heridas postquirúrgicas.
- Úlceras por presión (UPP).
- Quemaduras I, II, III grado.
- Se puede usar con hidrogeles.

MODO DE USO:

1. Realizar la asepsia de la herida estéril.
2. Secar el lecho de la herida.
3. Recortar tamaño apropiado según dimensión de la herida.
4. Hacer fricción para activar el coloide.
5. Adherir a la herida.
6. Cubrir con apósito secundario (opcional).
7. Cambiar apósito cada 24hrs máximo 48hrs.

TAMAÑO: 10x10cm - 15x20cm.

Amputation of diabetic foot | Danlí

Px: 45 years
Healing time: 21 days
Body part: left leg.



Day #1 | [August 23]
Calcium alginate dressing
with silver.



Day #21 | [September 15]
Hydrogel with hydrocolloid
dressings.

Not Contaminated Decubitus Ulcer | San Pedro Sula

Px: 65 years
Healing time: 18 days
Body part: sacrum area.



Day #1 | [August 15]



Day #7 | [August 22]



Day #18 | [September 02]

Hydrogel with hydrocolloid dressings.

*Daily change for seven (7) days.

APÓSITO CON HIDROGEL



Apósito estéril, impregnado de hidrogel, diseñado para tener contacto directo con la herida, el cual promueve la granulación y cicatrización ideal; de igual manera, nos ayuda a proporcionar y lograr **desbridamiento autolítico** en tejido necrótico desvitalizado.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Carboximetilcelulosa sódica (CMS): 4%
- Sodio: 80%
- Glicerina: 7%
- Sorbitol: 10%

INDICACIONES:

- Úlceras neuropáticas limpias.
- Úlceras vasculares limpias.
- Heridas postquirúrgicas limpias.
- Quemaduras I, II grado.
- Tejido necrótico.
- Promover la cicatrización en heridas en etapa de granulación.

MODO DE USO:

1. Realizar la asepsia de la herida estéril.
2. Secar el lecho de la herida.
3. Aplicar hidrogel de manera cavitada o superficial.
4. Cubrir con apósito secundario; cambios cada 24hrs máximo 48 hrs.

TAMAÑO: 10x10cm.

Infected and exudated diabetic patient | San Pedro Sula

Px: 43 years
Healing time: 51 days
Body part: right calf.



Day #1 | [May 03]

Calcium alginate dressing
with silver.

* Daily change.




Day #51 | [June 23]

Hydrogel with hydrocolloid
dressings.

* Daily change.

APÓSITO DE MIEL DE GRADO MÉDICO

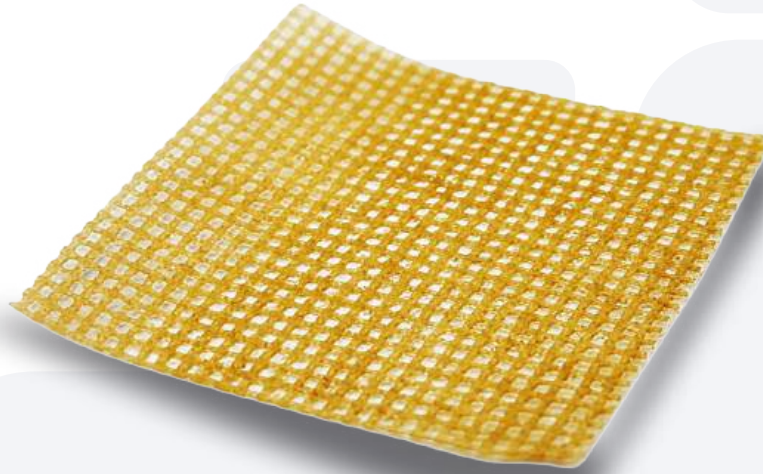

El apósito de miel, es un producto estéril desechable y está compuesto por miel de manuka y gasa. El apósito puede proteger la herida, formar y mantener eficazmente el entorno húmedo de la herida, y proporcionar un entorno adecuado para la cicatrización de la herida.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Miel de Manuka 99.7% (Grado medico)

INDICACIONES:

- Úlceras de pierna.
- Úlceras por presión.
- Quemaduras de 1º y 2º grado.
- Úlceras de pie diabético.
- Heridas quirúrgicas y traumáticas.
- Abrusiones menores.
- Laceraciones.
- Pequeños cortes.
- Pequeñas escoceduras y quemaduras.

MODO DE USO:

1. Limpiar la herida antes de aplicar el apósito.
2. Abrir el envase, retirar el apósito y colocarlo suavemente sobre la herida.
3. Cubrir con un apósito absorbente y fijarlo adecuadamente.
4. Cambiarlo diariamente en heridas con mucho exudado y luego cada 3 días, o según indicación clínica.
5. Retirarlo si se seca por completo.
6. Para retirarlo, hacerlo suavemente con pinzas o mano enguantada; si está adherido, humedecer con solución salina estéril.

TAMAÑO: 10x10cm

APÓSITO DE ESPUMA DE PLATA



El apósito de espuma de plata no adhesivo es un producto estéril, suave y altamente absorbente que elimina bacterias. Mantiene un ambiente húmedo que favorece la cicatrización al estimular el crecimiento y la regeneración celular.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Alginato de calcio :99.8%
- PlataAg :1.5%(60ppmm)

INDICACIONES:

- Heridas con exudado de moderado a abundante.
- Úlceras venosas, por presión, diabetes, arteriales de pierna.
- Heridas traumáticas superficiales.
- Zonas de injertos y donantes.
- Heridas cavitarias, postquirúrgicas.

MODO DE USO:

1. Limpiar la herida con solución estéril y secar la piel alrededor.
2. Elegir el tamaño adecuado y abrir el apósito con cuidado.
3. Usar un apósito secundario y, si es necesario, recortarlo con tijeras estériles.
4. Humedecer el apósito y colocarlo suavemente sobre la herida.

TAMAÑO: 4X4in

APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y PLATA



Apósito estéril de alginato cálcico con plata, altamente absorbente y antimicrobiano. Al contacto con la herida forma un gel que mantiene un ambiente húmedo y favorece la cicatrización, actuando contra bacterias. No debe reesterilizarse.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Alginato de calcio :99.8%
- PlataAg :1.5%(60ppmm)

INDICACIONES:

- Heridas con exudado de moderado a abundante.
- Úlceras venosas, por presión, diabetes, arteriales de pierna.
- Heridas traumáticas superficiales.
- Zonas de injertos y donantes.
- Heridas cavitarias, postquirúrgicas.

MODO DE USO:

1. Limpiar la herida con solución estéril y secar la piel alrededor.
2. Elegir el tamaño adecuado y abrir el apósito con cuidado.
3. Usar un apósito secundario y, si es necesario, recortarlo con tijeras estériles.
4. Humedecer el apósito y colocarlo suavemente sobre la herida.

TAMAÑO: 10x10cm.

APÓSITO AUTOADHERENTE DE ESPUMA DE SILICONA



Apósitos avanzados del cuidado de heridas con exudado moderado a alto, como úlceras y quemaduras. Su capa de silicona suave asegura una adhesión segura sin dañar la piel perilesional ni causar dolor al retirarlos.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Espuma de poliuretano: Capa de extensión no tejida.
- Capa con fibras de poliacrilato: Capa superabsorbente.
- Película exterior de PU, permeable al calor e impermeable.

INDICACIONES:

- Heridas exudativas de moderado a alto.
- Heridas postquirúrgicas.
- Preparación de lecho de la herida para injertos.
- Quemaduras grado I, II.
- Úlceras por presión UPP.

MODO DE USO:

1. Realizar asepsia correspondiente, clorhexidina y solución salina 0.9% secar el lecho de la herida, se puede usar una capa de hidrogel cubrir la herida con apósito de espuma, centrando la almohadilla en la herida.
2. Opcional cubrir con apósitos secundarios.
3. Cambios dependiendo la ubicación de la herida.

TAMAÑO: 10x10cm.

APÓSITO DE VASELINA CON CLORHEXIDINA



Es una gasa parafinada antiséptica de amplio espectro, diseñada para el tratamiento tópico de heridas con riesgo de infección. Combina la acción protectora **NO** adherente de la vaselina con el poder antibacteriano de la clorhexidina al 0.5% o 3.5%, siendo ideal para heridas contaminadas.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Clorhexidina al 0.5% o 3.5%
- Vaselina simple

INDICACIONES:

- Quemaduras Infeccionadas.
- Escoriaciones: Raspones, fricción.
- Sitios donantes de injertos.
- Laceraciones.
- Dehiscencia de herida quirúrgica
- Gangrenas de Fournier
- Úlceras Neuropáticas
- Úlceras Vasculares.

MODO DE USO:


1. Asepsia de la herida.
2. Secar el lecho de la herida.
3. Cubrir el lecho de la herida con el apósito de vaselina y clorhexidina.
4. Cubrir con apósito secundario.
5. Cambios diarios.

CONTRADICCIONES:

Pacientes con hipersensibilidad o alergia, a la clorhexidina.

TAMAÑO: 10x10cm.

APOSITO DE VASELINA CON YODO POVIDONA

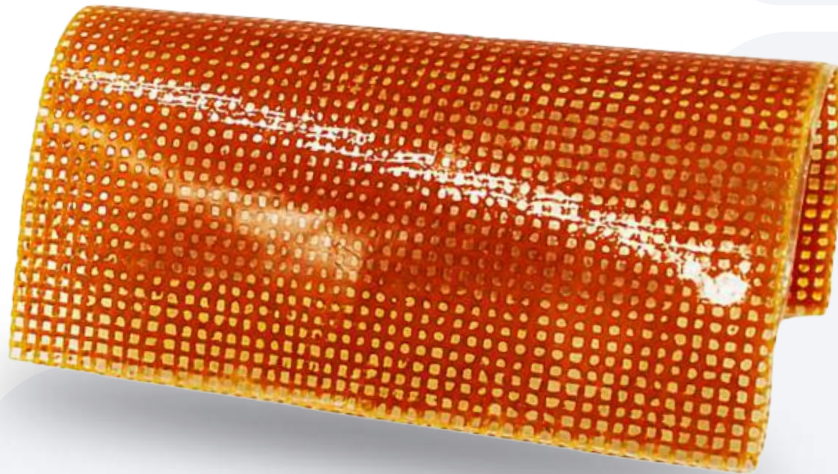

Apósito de vaselina con povidona yodado: vendaje NO adherente e impregnado de vaselina y povidona yodado, ideal para mantener un ambiente húmedo para prevenir infecciones antimicrobianas y proteger heridas como quemaduras, abrasiones y úlceras: UN, UV, UPP.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Vaselina Simple
- Povidone Yodado

INDICACIONES:

- Heridas superficiales.
- Quemaduras de I, II grado.
- Úlceras vasculares.
- Úlceras neuopáticas.
- Sitios de injertos.
- Hemostasia local.
- Absesos perianal.
- Gangrena de Fournier.

TAMAÑO: 10x10cm.

MODO DE USO:

1. Asepsia de la herida.
2. Secar el lecho de la herida.
3. Cubrir el lecho de la herida con el apósito de vaselina con povidona yodado.
4. Cubrir con apósito secundario.
5. Cambios diarios.

CONTRADICCIONES:

1. No utilizar en caso de alergias al povidona yodado.
2. No usar en paciente geriátrico y pediátrico.
3. No mezclar con hidrogeles con plata Ag.

HIDROGEL



Tubo con hidrogel estéril, transparente, diseñado para tener contacto directo con la herida, el cual promueve la granulación y cicatrización ideal; de igual manera, nos ayuda a proporcionar y lograr **desbridamiento autolítico** en tejido necrótico desvitalizado. V

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- Carboximetilcelulosa sódica (CMS): 4%
- Sodio: 80%
- Glicerina: 7%
- Sorbitol: 10%

INDICACIONES:

- Úlceras neuropáticas limpias.
- Úlceras vasculares limpias.
- Heridas postquirúrgicas limpias.
- Quemaduras I, II grado.
- Tejido necrótico.
- Promover la cicatrización en heridas en etapa de granulación.

MODO DE USO:

1. Realizar la asepsia de la herida estéril.
2. Secar el lecho de la herida.
3. Aplicar hidrogel de manera cavitada o superficial.
4. Cubrir con apósito secundario; cambios cada 24hrs máximo 48 hrs.



medKo

Wound Care

MEY-Ko



www.meyko.com



@meykohn

Línea gratuita 800-2222-4444