



COMODIDAD DEL PACIENTE

El ZSI 100 CF es flexible. Después de las relaciones sexuales, el pene se dobla fácilmente en la ropa interior y los pantalones, lo que permite una comodidad óptima del pene.

SU APOYO ÚTIL PARA
LA NEURO-UROLOGÍA Y
LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

ZSI 100 CF

Implante de Pene Blando Maleable




FUNCIONAMIENTO

1




Cuando se mantiene en pantalones y ropa interior, el pene está en posición flácida.

2

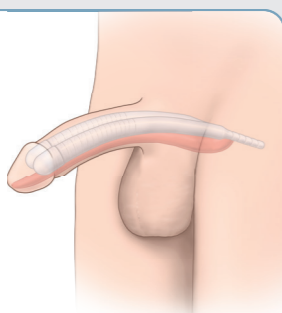


Cuando el pene se libera de la presión de los pantalones y la ropa interior, está semierecto.

3

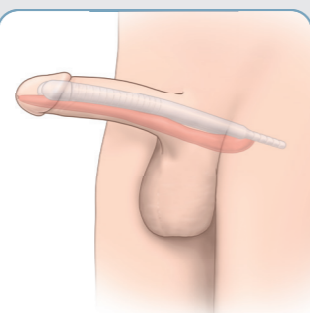

Con la excitación y el flujo sanguíneo débil natural que permanece en el tejido eréctil, el pene mejora su rigidez.

4

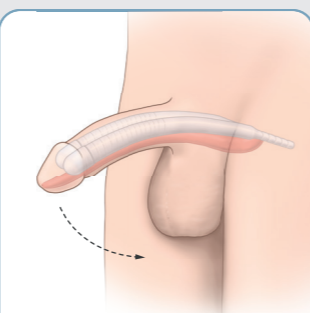

Después de las relaciones sexuales, el flujo de sangre natural disminuirá y dará lugar a una semierección y un pene flácido.

ESCÁNER DE AEROPUERTO Y RM

- El paciente puede viajar con el implante de pene blando maleable ZSI 100 CF. No se detecta por los escáneres del aeropuerto.
- El implante ZSI 100 CF también es seguro en RM (Resonancia Magnética).



ZSI - Zephyr Surgical Implants
Route des jeunes, 4bis
CH1227 Les acacias-Genève
Switzerland



Version 27

WWW.ZSIMPLANTS.CH

Zephyr Surgical Implants cumple con la norma ISO 13485.
Los implantes cumplen con el mercado CE.

ZSI 100 CF

DISEÑO SENCILLO PARA MÚLTIPLES USOS

Parte distal


Longitud de 80 mm.
Se puede ajustar cortándolo
(5 mm por 5 mm).

Parte central

Longitud de 120 mm.

Parte proximal

Longitud de 50 mm.
Se puede ajustar
cortándolo
(10 mm por 10 mm).

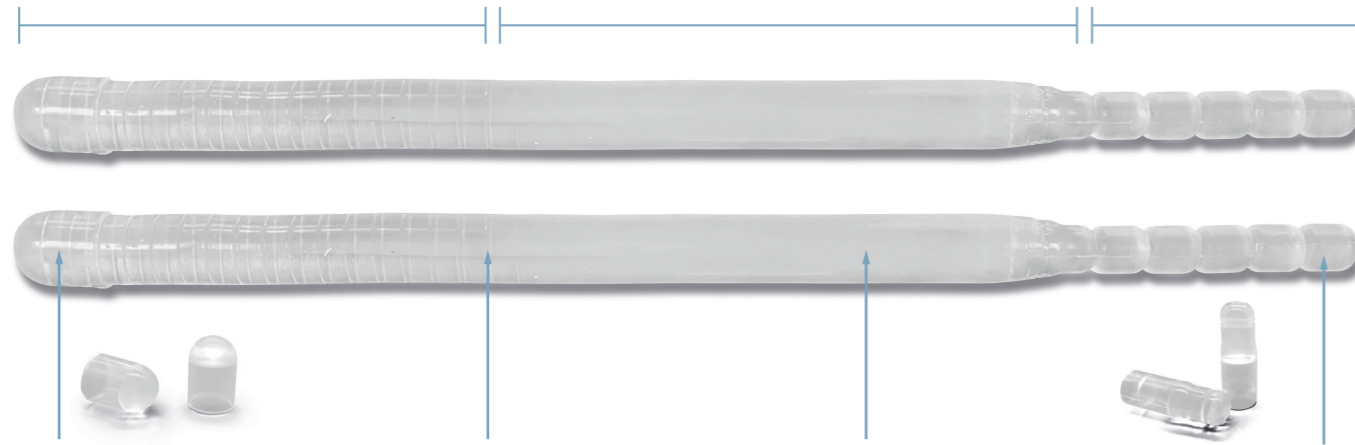

Puntas distales

Contacto seguro con el cuerpo cavernoso después de cortar la prótesis a la longitud adecuada.

Cilindros maleables

Revestimiento de PVP hidrófilo que absorbe los antibióticos, ayudan a combatir las infecciones.

Silicona médica de alta calidad

La mejor calidad para proporcionar más suavidad y comodidad.

Extensores opcionales

En caso de mal corte, se proporciona un par de 1,5 cm que se pueden reducir a 1 cm.

EL ZSI 100 CF SE ADAPTA A TODOS LOS TAMAÑOS DE CUERPOS CAVERNOSOS

TRES DIÁMETROS DISPONIBLES

El ZSI 100 CF está disponible en tres diámetros diferentes para que se ajuste a las características anatómicas de los cuerpos cavernosos del paciente: 9 mm, 11 mm, 13 mm.

LARGO AJUSTABLE POR CORTE

El ZSI 100 CF se puede ajustar de 25 a 12 cm. El cirujano puede reducir la longitud de la parte distal y la parte proximal para adaptarse a las características anatómicas de cada paciente.



Empiece siempre cortando primero la parte distal.


MÚLTIPLES PROPÓSITOS DEL ZSI 100 CF

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Los hombres con enfermedad o lesión de la médula espinal pueden tener disfunción eréctil debido a la interrupción de los circuitos nerviosos involucrados en las erecciones.


El ZSI 100 CF, implantado en los dos cuerpos cavernosos del pene, ofrece la mínima resistencia a la presión de 500 g necesaria para penetrar en la vagina.

Su flexibilidad reduce el riesgo de erosión de los cuerpos cavernosos al limitar las presiones anormales y la fricción exagerada de los tejidos del pene.

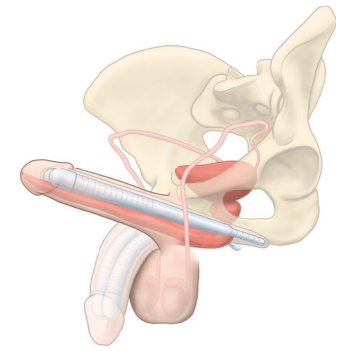


PERMITE UN AUTOCATETERISMO INTERMITENTE MÁS FÁCIL

Muchos pacientes no tienen la destreza para realizar un autocateterismo intermitente y esto puede provocar una perforación uretral, especialmente cuando el paciente tiene el pene retraído. El implante de pene blando alinea la uretra, lo que hace que el autocateterismo intermitente sea más fácil y seguro.

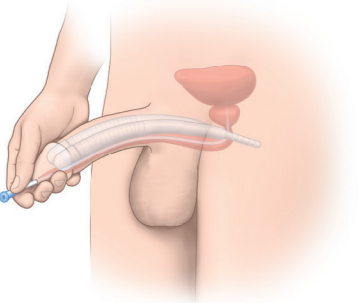


MANTIENE LA ENVOLTURA DEL DISPOSITIVO DE DRENAJE EN SU LUGAR

Los implantes peneanos blandos pueden ser útiles para mantener los dispositivos de drenaje urinario externos sobre el pene, especialmente al permitir su colocación adecuada y reducir la incidencia de laceraciones cutáneas frecuentes que requieren sondas de Foley.

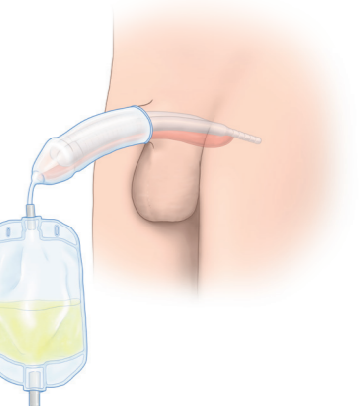

TRATA LA ENFERMEDAD DE PEYRONIE

La prótesis se utiliza como soporte.

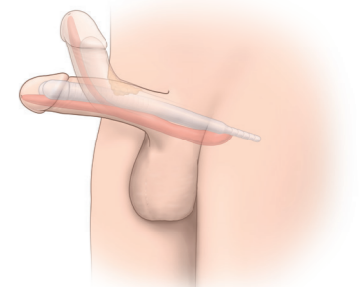

MANTIENE UN ESPACIO EN LOS CUERPOS CAVERNOSOS

En caso de extracción del implante peneano inflable por infección o erosión, la inserción de un ZSI 100 CF mantiene un espacio en los cuerpos cavernosos, lo que facilitará la inserción de un nuevo implante peneano inflable a los 3 o 6 meses.

Además, el ZSI 100 CF tiene un revestimiento de PVP para luchar contra las infecciones.

