

01

Calcetines  
o medias hasta  
la rodilla

02

Medias al muslo  
y pantimedia

03

Medias T.V.P.  
Antiembólicas

Baja  
8-15 mmHg



Mediana  
15-20 mmHg



Firme  
20-30 mmHg



Extra Firme  
30-40 mmHg



NV-X Sport  
15-20 mmHg



T.V.P.  
18-22 mmHg



¡Escanea!

Encuentra videos instructivos de como colocar las medias y como tomar las medidas para identificar tu talla ideal.

No-Varix  
¡Gracias Piernas!

¡Esta es la guía  
para encontrar  
la talla ideal  
de las medias  
No-Varix®!

Síguenos en:

f NoVarixColombia @NoVarixColombia

essity Medical Solutions

**No-Varix**  
¡Gracias Piernas!



Siga estos pasos y encuentre la talla ideal en medias de compresión No-Varix®


Porque un buen ajuste de las medias es la mejor forma de decir:

¡Gracias Piernas!

Siga estos pasos y encuentre la talla ideal en medias de compresión No-Varix®

**01 CALCETINES O MEDIAS HASTA LA RODILLA**

**MEDIDAS A TENER EN CUENTA:**

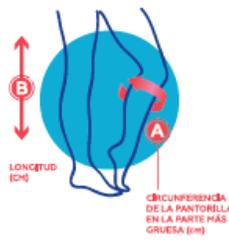


- A La circunferencia de la pantorrilla.
- B La altura desde el talón hasta la parte posterior de la rodilla.

**Ejemplo:** Si la medida para el punto (A) es de 38 cm, y para el punto (B) es de 45,5 cm la talla correcta es la **L**.



**02 PARÁMETROS PARA MEDIAS AL MUSLO Y PANTIMEDIA**

**ES NECESARIO CONOCER:**

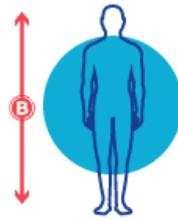


- A Peso Actual
- B Estatura exacta

**Ejemplo:** Si el peso actual (A) es de 61 Kg, y la estatura (B) es de 160 cm la talla correcta es la **M**.

**03 PARA MEDIAS T.V.P. ANTIEMBÓLICAS**

**MEDIDAS A TENER EN CUENTA:**

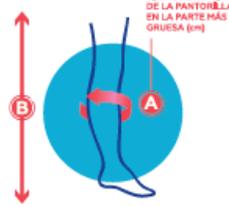

- A La circunferencia de la pantorrilla.
- B La altura desde el talón hasta la parte superior del muslo.

**Ejemplo:** Si la medida para el punto (A) es de 34,5 cm, y para el punto (B) es de 76 cm la talla correcta es la **M**.

CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILLA	11" (28 cm)	12" (30,5 cm)	13" (33 cm)	14" (35,5 cm)	15" (38 cm)	16" (40,5 cm)	17" (43 cm)	18" (45,5 cm)
14" (35,5 cm)	S/CU/P	S/CU/P	S/CU/P	S/CU/P	M	M	L/G	L/G
15" (38 cm)	S/CU/P	S/CU/P	S/CU/P	M	M	L/G	L/G	L/G
16" (40,5 cm)	S/CU/P	S/CU/P	M	M	M	L/G	L/G	L/G
17" (43 cm)	S/CU/P	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG
18" (45,5 cm)	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG	XL/EG
19" (48 cm)	M	M	M	M	L/G	XL/EG	XL/EG	XL/EG



		Peso (lbs)																																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Altura (ft)	4'4"	SMALL																				112,2												
	4'6"	SMALL																				115,7												
	4'8"	SMALL																				119,2												
	4'10"	SMALL																				122,7												
	4'12"	SMALL																				126,2												
	5'0"	SMALL																				129,7												
	5'2"	SMALL																				133,2												
	5'4"	SMALL																				136,7												
	5'6"	SMALL																				140,2												
	5'8"	SMALL																				143,7												
Altura (cm)	134	SMALL																				112,2												
	137	SMALL																				115,7												
	140	SMALL																				119,2												
	143	SMALL																				122,7												
	146	SMALL																				126,2												
	149	SMALL																				129,7												
	152	SMALL																				133,2												
	155	SMALL																				136,7												
	158	SMALL																				140,2												
	161	SMALL																				143,7												



**T.V.P.**  
No-Varix

Punto de medida	Small / Chica / Pequeña Regular	Medium / Mediana Regular	Large / Grande Regular	X-Large / Extra Grande Regular
A, Circunferencia Pantorrilla	Hasta 31,8 cm	31,8 cm a 36,8 cm	36,8 cm a 41,9 cm	41,9 cm a 47 cm
B, Largo de pierna	73,7 cm a 78,7 cm	73,7 cm a 78,7 cm	73,7 cm a 78,7 cm	Hasta 78,7 cm

