




Catéteres de Embolectomía

(Una- Vía con /sin Latex , Dos Vías - OTW,)





Catéter Embolectomía

Alta Calidad y Confianza en Catéteres de Embolectomía

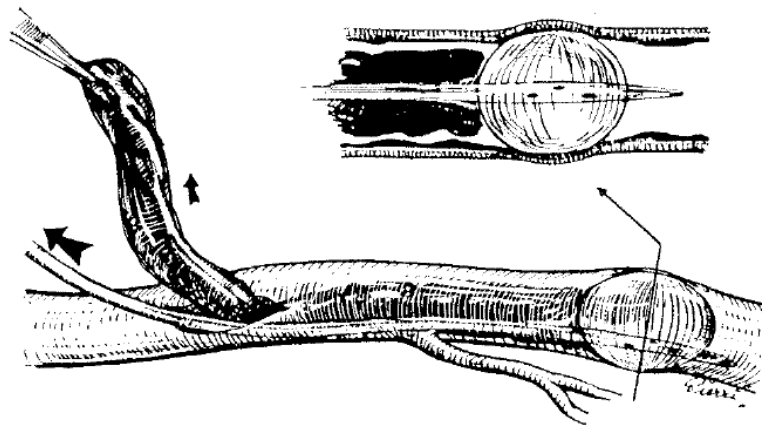


a

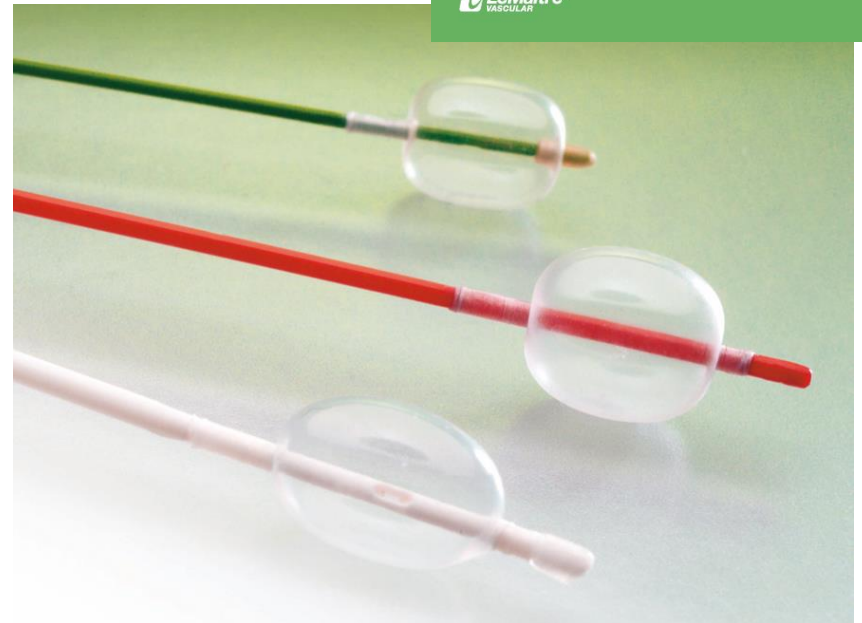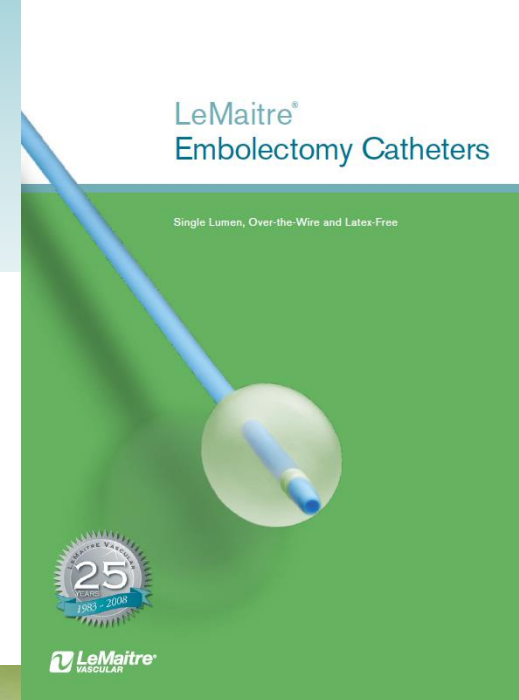

LeMaitre „Una Sola Vía“ Catéteres de Balón para Embolectomía

- Alta resistencia del Balón de Latex a la rotura
- Buen agarre del Balón de Latex para arrastrar el trombo
- Extremo atraumático con punta NO flexible
- Dos puntos Radiopacos en los extremos del Balón para mejorar visibilidad bajo fluoroscopia
- Buena concetricidad de los balones para eliminar el trombo
- Inflado de balón progresivo y constante
- Alta flexibilidad en regiones anatómicas difíciles
- Caducidad : 6 años

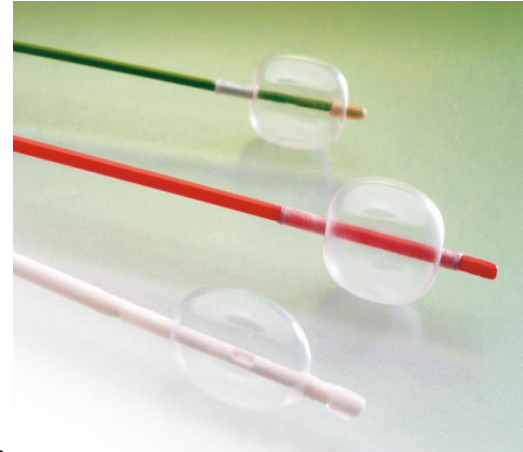

Las Mayores Ventajas de los Catéteres de Embolectomia de una Vía son :

Balon

- **Menos Roturas durante el procedimiento**

1. Balón Latex

- Buen agarre, buena eliminación del trombo o del material embólico.

2. Material del Catéter – PEBAX (10 veces más resistente que PVC) (PEBA Poly- Ether-Block-Amide)

- Plastico extra fuerte , **alta fuerza de extracción** (sin rotura)
- **Radiopaco en todos los modelos**, visibilidad bajo fluoroscopia (rayos - X)

Catéteres de una Via LeMaitre

- Rango de Productos -



Diámetro (French / F) & Código Color	Longitud [cm]	Diámetro Balón [mm]	Volumen Balón	REF
2	40	4.5	0.05 ml	1601-24
2	60	4.5	0.05 ml	1601-26
2	80	4.5	0.05 ml	1601-28
3	40	8.0	0.20 ml	1601-34
3	80	8.0	0.20 ml	1601-38
4	40	10.5	0.75 ml	1601-54
4	80	10.5	0.75 ml	1601-48
5	80	13.0	1.50 ml	1601-58
6	80	13.5	1.60 ml	1601-68
7	80	14.0	1.75 ml	1601-78

Catéteres de Embolectomía Sin Latex LeMaitre Novasil



Cuando los catéteres de embolectomía SIN latex sean necesarios

SIN Latex



Alergia al Latex ?

- Catéteres sin latex?
- Las manifestaciones alergicas provienen de los guantes !



- Aproximadamente solo un 1% de las ventas son de este tipo



Catéteres de Embolectomía Sin Latex LeMaitre Novasil



SIN Latex

➤ **Balon de Silicona**


- Menos agarre

➤ **Cateter de silicona**

Menos resistencia

Sugerencia:


- Mantener un mínimo stock para pacientes con alergia al latex (1%)
- Los catéteres con balon de latex son mejor opción para la eliminación de trombos

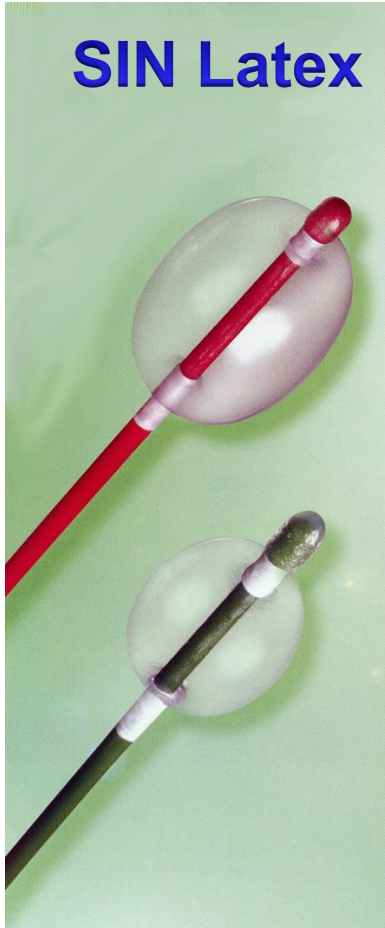

Catéteres de Embolectomía Sin Latex LeMaitre Novasil



SIN Latex



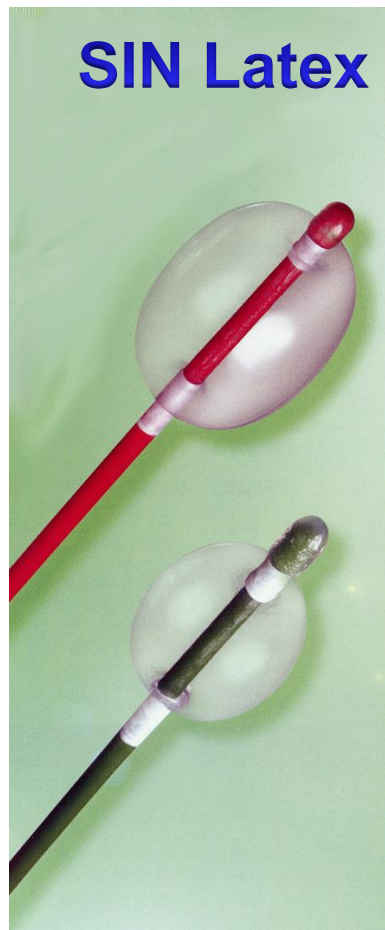


Diámetro (French / F) & Código Color	Longitud [cm]	Diámetro Balón [mm]	Volumen Balón [ml]	REF
2F	60	0,05	4	1801-26
3F	40	0,20	6	1801-34
3F	80	0,20	6	1801-38
4F	40	0,60	9	1801-54
4F	80	0,60	9	1801-48
5F	80	1,00	11	1801-58
6F	80	1,60	13	1801-68
7F	80	1,75	14	1801-78

Caducidad: 6 años


Catéteres de Embolectomía de Dos Vías LeMaitre® OTW

- Solución para la eliminación de trombo bajo guía con fluoroscopia

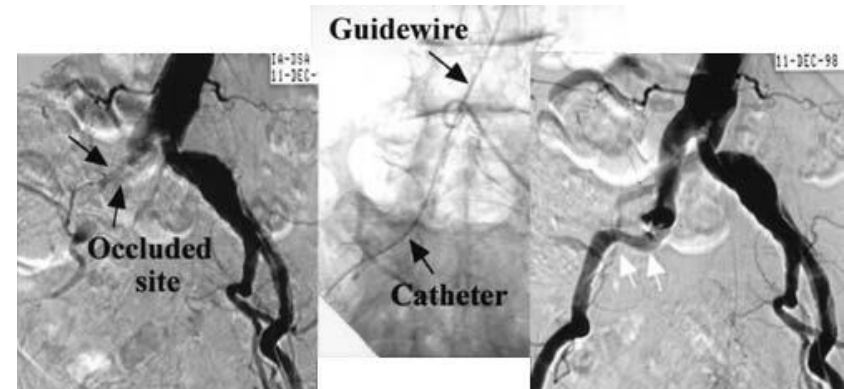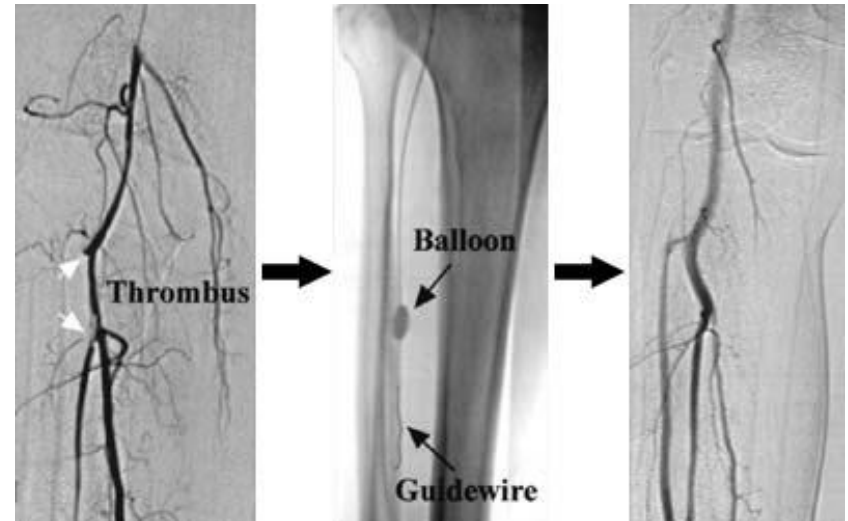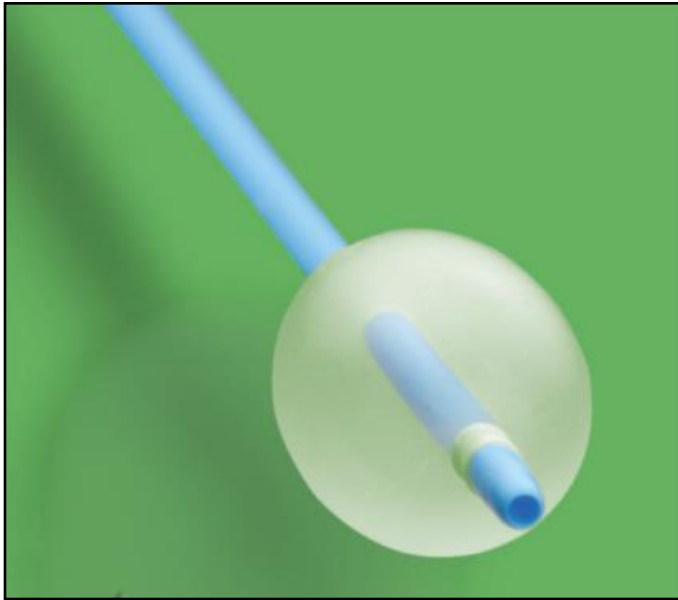

Pictures: Hasegawa, Y. Jpn. J. Vasc. Surg., 12:71-75, 2003

Catéteres de Embolectomía de Dos Vías LeMaitre® OTW

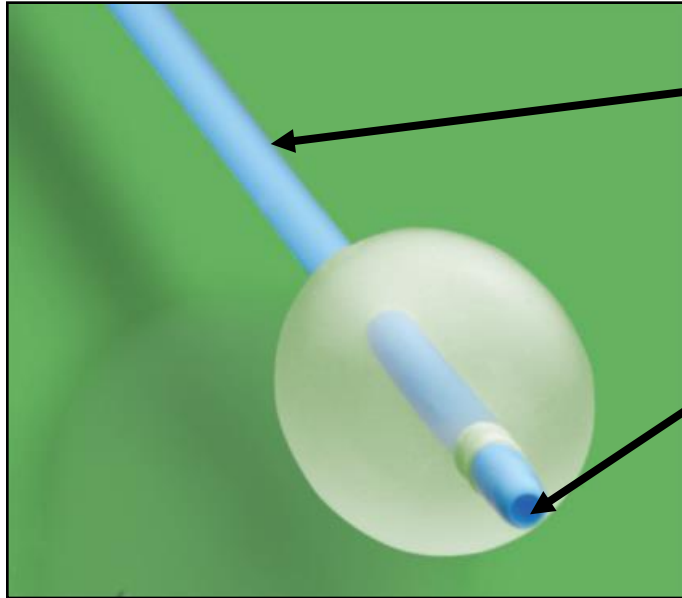

- Cuerpo del catéter radiopaco
- Doble vía para;
 - Alambre Guia
 - Y / O dispensación de fluido (irrigación)
- Con jeringa
- Caducidad: 6 años

Gestión Moderna del Trombo con la técnica „Over-the-Wire“ (OTW)

OTW Catéter = Una buena herramienta multifuncional para:

- **Eliminar el coagulo utilizando control fluoroscopico**
 - ▶ Paso a través de arterias tromboticas enfermas con guia.
 - ▶ Control total del catéter (menos riesgo de daño arterial)
 - ▶ Inyección del medio de contraste, ruptura local, etc. (2ª via)
- **Combinación con metodos endovasculares (PTA/Stent).**




● **RECUERDA:**

- ▶ **Catéteres de Angioplastia Transluminal Percutanea (PTA) NO son adecuados para eliminar un trombo**

Ventaja al utilizar OTW con Medio de Contraste


- Utilizar el catéter de embolectomía con medio de contraste (aprox. 10-25% de MC)

- A. Minimo inflado: casi ningún contacto con el lumen del vaso
- B. Inflado Apropriado: cerradas las paredes del vaso
- C. Overinflation: significante fuerza radial sobre las paredes del vaso .

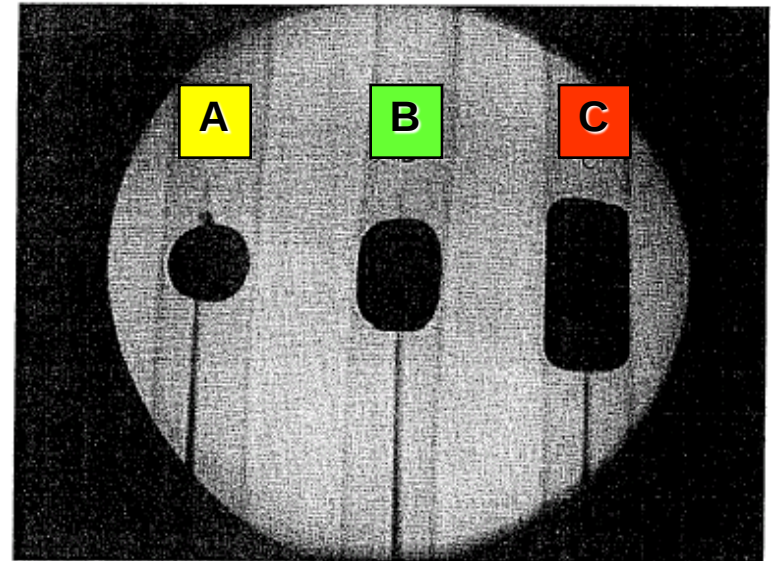

Parsons RE, Marin ML, Veith FJ, Sanchez LA, Lyon RT, Suggs WD, et al. Fluoroscopically assisted thromboembolectomy: an improved method for treating acute arterial occlusions. Ann Vasc Surg 1996 May;10(3):201-10.

Catéteres de Embolectomía de Dos Vías LeMaitre® OTW (catalogo de productos)

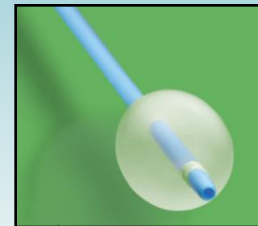

Diámetro (French / F) & Código Color	Longitud [cm]	Diámetro Balón [mm]	Volumen Balón	Guía [inch/pulgadas]	REF
3	40	6.0	0.20 ml	0.018"	1651-34
3	80	6.0	0.20 ml	0.018"	1651-38
4	40	10.0	0.75 ml	0.025"	1651-44
4	80	10.0	0.75 ml	0.025"	1651-48
5.5	40	12.0	1.50 ml	0.035"	1651-84
5.5	80	12.0	1.50 ml	0.035"	1651-88
6	40	13.0	1.60 ml	0.035"	1651-64
6	80	13.0	1.60 ml	0.035"	1651-68
7	80	14.0	1.75 ml	0.038"	1651-78